


# ENLEVER LA TOILE DOUBLE CUISSARDE DU LÈVE-PERSONNE SOUS UNE CLIENTE ASSISE DANS LE LIT

Équipement

Caractéristiques de la cliente : pas de mise en charge sur ses jambes | tonus du tronc.

## Étape 1

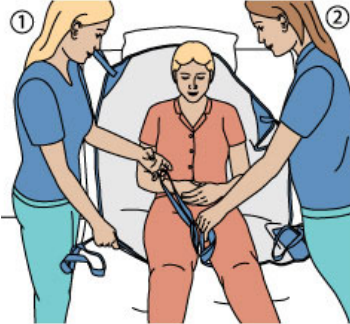

### INTERVENANTE 1

- ♦ Décrocher les sangles de la toile du cintre du lève-personne.

### INTERVENANTES 1 ET 2

- ♦ Décroiser les petites sangles des cuissardes en les glissant sous les genoux de la cliente, puis tirer.

## Étape 2



### INTERVENANTES 1 ET/OU 2

- ♦ Effectuer un contre-poids pour avancer le tronc de la cliente.

## Étape 3



### INTERVENANTE 1

- ♦ Maintenir la cliente dans la position (au besoin).

### INTERVENANTE 2

- ♦ Retirer la toile.

## Étape 4



### INTERVENANTES 1 ET/OU 2

- ♦ Repositionner la cliente dans son lit.

**Mise en garde :** la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.