




# Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer<sup>MD</sup> Eclipse<sup>MC</sup> avec barillet à usage unique BD Vacutainer<sup>MD</sup>

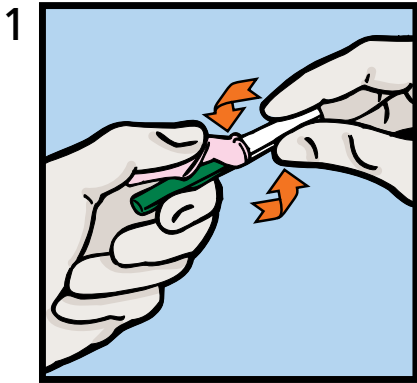


1 En tenant à la fois le protecteur rose et le capuchon coloré, tournez et retirez le capuchon blanc.

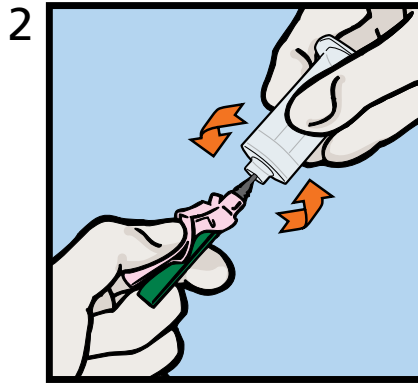


2 En tenant fermement l'aiguille, vissez le barillet à la base de l'aiguille jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.

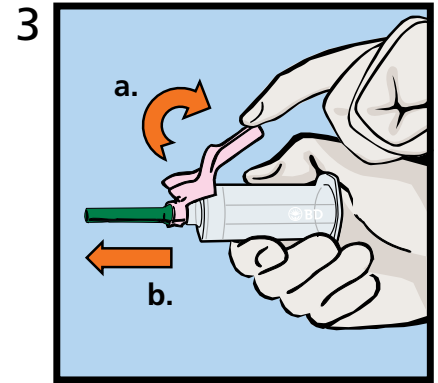


3 (a) Ramenez le protecteur rose vers le barillet en le faisant pivoter.  
(b) Tournez et retirez d'un trait le capuchon coloré recouvrant l'aiguille.

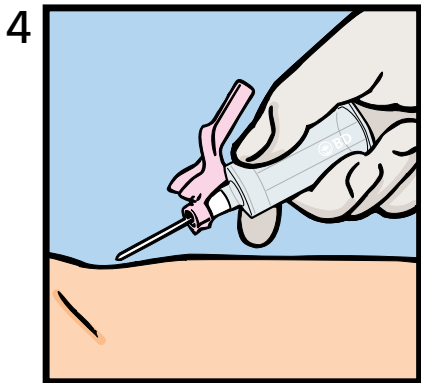

4 Effectuez la ponction veineuse conformément aux procédures de votre établissement.

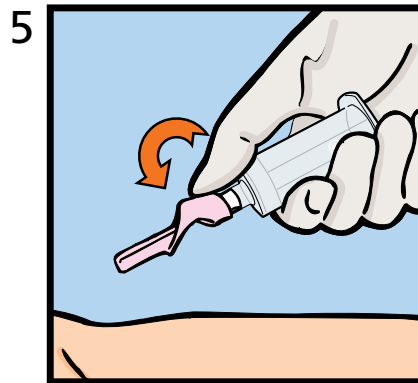

5 Immédiatement après avoir retiré l'aiguille de la veine, recouvrez l'aiguille en poussant le protecteur rose vers l'avant avec le pouce sur l'appui-pouce. Vous entendrez peut-être un déclic. Verrouillez le protecteur en place et inspectez le dispositif. **NE TENTEZ PAS** d'enclencher le protecteur en l'appuyant contre une surface dure.

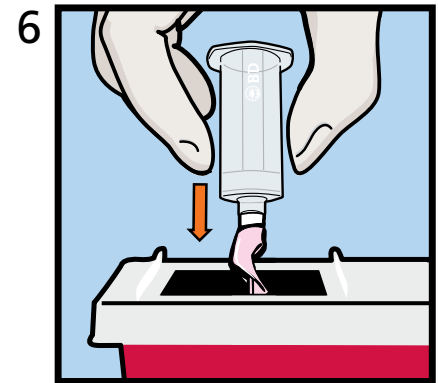

6 **NE RETIREZ PAS** l'aiguille du barillet. Après usage, jetez l'aiguille et le barillet en bloc dans le contenant pour objets piquants et tranchants le plus près. **NE LES RÉUTILISEZ PAS.**



Barillet à usage unique  
BD Vacutainer<sup>MD</sup>

**Numéro de référence:**  
**364815**

Aiguilles pour prélèvement  
sanguin BD Vacutainer<sup>MD</sup>  
Eclipse<sup>MC</sup>

**Numéro de référence:**  
**368607 21 G**  
**368608 22 G**

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- **NE PAS RÉUTILISER LE BARILLET.**
- Le filet du barillet est conçu pour **UNE SEULE UTILISATION.**
- La réutilisation du barillet n'est pas sécuritaire et peut entraîner des blessures graves ou une exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang.
- Après usage, jeter l'aiguille et le barillet en bloc.

## POUR USAGE UNIQUE SEULEMENT


Services techniques BD: 1 800 268 5430  
Services à la clientèle BD: 1 866 979 9408  
[www.bd.com/ca](http://www.bd.com/ca)




2771 Bristol Circle  
Oakville, ON L6H 6R5

# Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer<sup>MD</sup> Eclipse<sup>MC</sup>


avec barillet préfixé

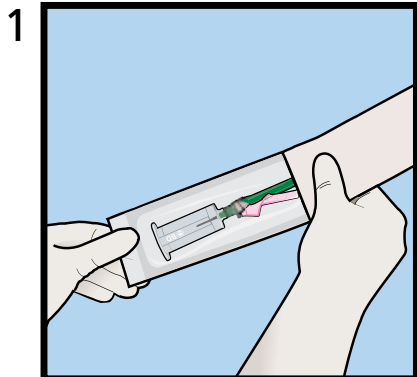


1 Le dispositif est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Aucun assemblage requis !

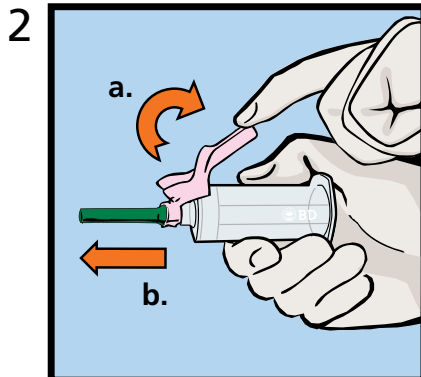


2 (a) Ramenez le protecteur rose vers le barillet en le faisant pivoter.  
(b) Tournez et retirez d'un trait le capuchon coloré recouvrant l'aiguille.

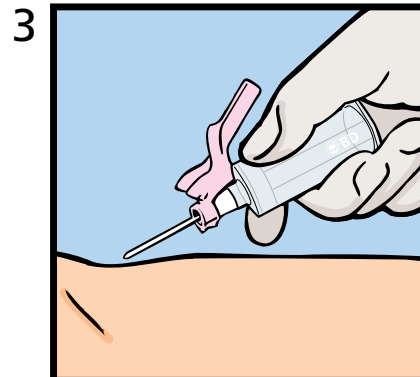


3 Effectuez la ponction veineuse conformément aux procédures de votre établissement.

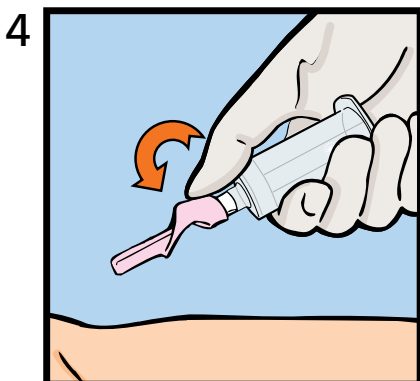

4 Immédiatement après avoir retiré l'aiguille de la veine, recouvrez l'aiguille en poussant le protecteur rose vers l'avant avec le pouce sur l'appui-pouce. Vous entendrez peut-être un déclic. Verrouillez le protecteur en place et inspectez le dispositif. **NE TENTEZ PAS** d'enclencher le protecteur en l'appuyant contre une surface dure.

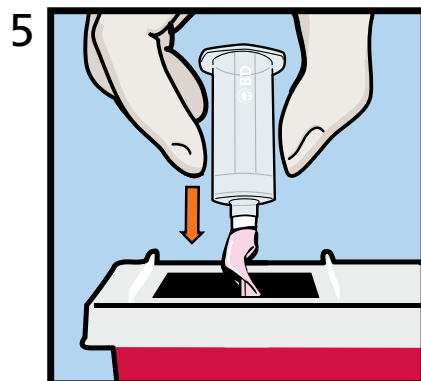

5 **NE RETIREZ PAS** l'aiguille du barillet. Après usage, jetez l'aiguille et le barillet en bloc dans le contenant pour objets piquants et tranchants le plus près. **NE LES RÉUTILISEZ PAS.**

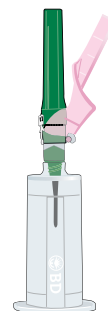

Aiguilles pour prélèvement sanguin BD Vacutainer<sup>®</sup> Eclipse<sup>™</sup> avec barillet préfixé

**Numéros de référence:**

**368650 21G**

**368651 22G**

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- **NE PAS RÉUTILISER LE BARILLET.**
- Le filet du barillet est conçu pour **UNE SEULE UTILISATION.**
- La réutilisation du barillet n'est pas sécuritaire et peut entraîner des blessures graves ou une exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang.
- Après usage, jeter l'aiguille et le barillet en bloc.

## POUR USAGE UNIQUE SEULEMENT

Services techniques BD: 1 800 268 5430  
Services à la clientèle BD: 1 866 979 9408  
[www.bd.com/ca](http://www.bd.com/ca)



2771 Bristol Circle  
Oakville, ON L6H 6R5