



Jeter l'aiguille protégée en toute sécurité:

- Pour jeter une aiguille insérée dans le barillet à dédouchement rapide BD Pronto^{MC}, il suffit de tenir l'aiguille au-dessus de l'ouverture d'un collecteur d'objets pointus et d'appuyer sur le bouton vert du barillet.
- Dans le cas du barillet classique, il faut simplement faire glisser l'aiguille dans l'orifice de déblocage en forme de V du collecteur d'objets piquants BD Vacutainer^{MD}, puis dévisser l'aiguille ou jeter l'aiguille et le barillet ensemble.

S'il s'agit du barillet BD Pronto^{MC}: appuyer sur le bouton de réengagement blanc, le barillet est prêt pour une nouvelle utilisation.