

Le dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} vous protège.


5 étapes simples*



À l'aide de trois doigts, appliquez une légère pression sur le point de ponction, comme sur l'illustration.



Retirez le dispositif de prélèvement sanguin en saisissant la prise du protecteur jaune entre le pouce et l'index.

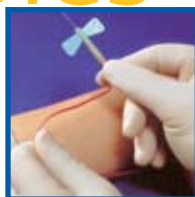

Avec l'autre main, saisissez la tubulure entre le pouce et l'index.



Faites glisser le protecteur jaune vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé.



Jetez le dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} et le barillet dans le contenant pour objets piquants et tranchants le plus près.

* Technique modifiée à une main. Consulter la fiche informative pour les techniques à une main et à deux mains.

Renseignements pour la commande



N° de réf.	Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer ^{MD} Safety-Lok ^{MC}	Qté par boîte et par caisse
367281	Avec raccord luer, 21 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
367283	Avec raccord luer, 23 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
367285	Avec raccord luer, 25 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
367287	Avec raccord luer, 21 G, 3/4 po, tubulure de 7 po	50/200
367292	Avec raccord luer, 23 G, 3/4 po, tubulure de 7 po	50/200
367294	Avec raccord luer, 25 G, 3/4 po, tubulure de 7 po	50/200
367296	Sans raccord luer, 21 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
367297	Sans raccord luer, 23 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
367298	Sans raccord luer, 25 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
Dispositifs de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} avec barillet préfixé		
368652	Avec barillet préfixé, 21 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	25/200
368653	Avec barillet préfixé, 23 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	25/200
368654	A venir : Avec barillet préfixé, 21 G, 3/4 po, tubulure de 7 po	25/200
368655	A venir : Avec barillet préfixé, 23 G, 3/4 po, tubulure de 7 po	25/200
Dispositifs à bouton activateur pour prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD}		
367344	Avec raccord luer, 21 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
367342	Avec raccord luer, 23 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
367341	Avec raccord luer, 25 G, 3/4 po, tubulure de 12 po	50/200
Barillet à usage unique BD Vacutainer^{MD}		
364815	Barillet à usage unique	250 par sac 1000 par caisse
Adaptateurs BD Vacutainer^{MD}		
367290	Adaptateur luer multi-échantillons	100/1000
364894	Adaptateur pour prélèvement direct	50/200
364902	Dispositif d'accès BD Luer-Lok ^{MC}	50/200
Garrot BD Vacutainer^{MD}		
367203	Garrot Stretch sans latex	25/500

Toutes les aiguilles à ailettes doivent être utilisées avec un barillet à usage unique BD Vacutainer^{MD}, un adaptateur luer multi-échantillons BD Vacutainer^{MD} ou un dispositif d'accès BD Vacutainer^{MD} Luer-Lok^{MC}.

Services techniques BD : 1.800.268.5430 poste 5567
Service à la clientèle BD : 1.866.979.9408
www.bd.com/ca



2771 Bristol Circle
Oakville ON L6H 6R5

MISE EN GARDE : Manipulez avec précaution tous les échantillons biologiques et les « objets piquants et tranchants » servant au prélèvement sanguin (lancettes, aiguilles, adaptateurs luer et dispositifs de prélèvement sanguin) conformément aux politiques et procédures en vigueur dans votre établissement. Obtenez une assistance médicale adéquate en cas d'exposition aux échantillons biologiques (par piqûre accidentelle, par exemple), car ceux-ci présentent un risque de transmission de l'hépatite virale, du VIH (virus du sida) ou d'autres maladies infectieuses. Utilisez le protecteur intégré d'aiguille usagée si le dispositif de prélèvement sanguin en comporte un. BD déconseille au personnel médical de recapuchonner les aiguilles souillées, tout en reconnaissant que les politiques et procédures de chaque établissement peuvent varier et qu'elles doivent être suivies en tout temps. Jetez tout objet piquant ou tranchant pour prélèvement sanguin dans des contenants à déchets biomédicaux approuvés pour leur mise au rebut.

BD, le logo de BD et les autres marques de commerce sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2007 BD 04/07 BDPAS0079-CF

Dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC}



Maintenant offert
avec un barillet
préfixé



Pour que chacun
vive en bonne santé



Commodité

Conformité

Engagement

Commodité

parce que pratiquer la sécurité devrait être simple.

Le dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} est doté d'un barillet préfixé : il est donc prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage et ne requiert aucun assemblage.

Le protecteur d'aiguille BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} accroît la sécurité et ne nécessite aucun changement dans la technique.


Le modèle mince et facile à manipuler assure une meilleure maîtrise et une plus grande souplesse.

Les grandes ailettes permettent un meilleur positionnement durant l'usage.

L'enroulement minimal de la tubulure facilite la manipulation.

Le reflux sanguin se voit clairement à travers le protecteur transparent.

L'adaptateur luer intégré et pratique permet le prélèvement de plusieurs échantillons en « système clos », ce qui rend le dispositif encore plus sûr à utiliser.

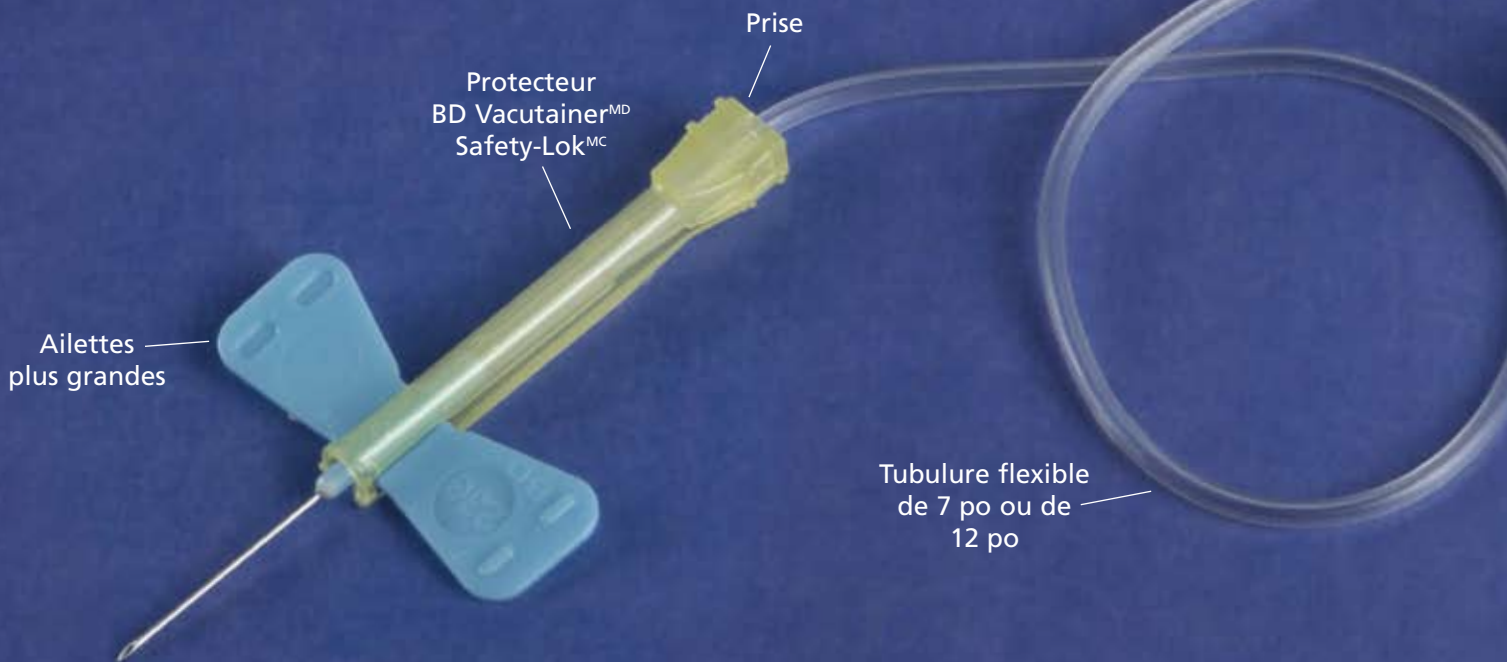

Conformité

parce que votre patient devrait être votre principale préoccupation.

Le dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} avec un barillet préfixé est conçu pour aider les établissements à se conformer à la directive OSHA SHIB 10-15-03 de l'OSHA relative aux barillets à usage unique et ce, en réduisant le risque de réutilisation des barillets.

Grâce au dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} avec un barillet préfixé, vous serez toujours assuré d'avoir la même quantité de barillets et de dispositifs de prélèvement sanguin BD Safety-Lok^{MC}.

Le protecteur d'aiguille est conçu pour aider les établissements à répondre aux présentes normes de sécurité fédérales américaines de l'OSHA en matière de mesures d'ingénierie¹.

¹Directive de conformité fédérale américaine de l'OSHA, 1999.



Barillet préfixé

Adaptateur luer
multi-échantillons

Engagement

parce que votre produit devrait être fiable.

Le dispositif de prélèvement sanguin BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} avec un barillet préfixé protège le travailleur de la santé contre l'exposition aux aiguilles perce-tubes.

Le protecteur d'aiguille BD Vacutainer^{MD} Safety-Lok^{MC} réduit le risque de piqûres d'aiguilles à la grandeur de l'hôpital, tant pour le personnel que pour les patients.

Après l'usage, le protecteur recouvre facilement et entièrement l'aiguille afin de bien isoler l'aiguille.

Une sécurité accrue, de l'activation du protecteur jusqu'à la mise au rebut finale dans un contenant approuvé pour objets piquants et tranchants, peut contribuer à réduire les coûts à long terme des blessures par piqûre d'aiguille.