


Seringue Integra™ de BD

Avec aiguille rétractable PrecisionGlide™ de BD

FICHE DE CONSULTATION RAPIDE

1

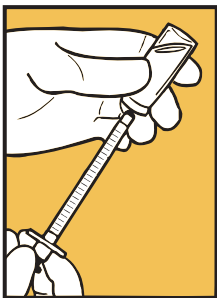

ASPIRATION

Aspirez le médicament selon les procédures en vigueur.

2



INJECTION

Administrez le médicament selon les procédures en vigueur, en vous assurant que tout le médicament a été administré.

Seringue Integra™ de BD

Avec aiguille rétractable PrecisionGlide™ de BD

FICHE DE CONSULTATION RAPIDE


3



ACTIVATION

Appuyez sur la tige du piston afin d'activer le mécanisme de sécurité. Faites descendre le piston jusqu'à ce que vous sentiez deux déclics.

4

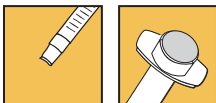

RETRAIT

Au moment de l'activation, l'aiguille disparaîtra dans la seringue et le piston sera enfoncé dans le corps de la seringue.

L'aiguille utilisée n'est plus à découvert. Jetez immédiatement la seringue dans un collecteur d'aiguilles officiellement prévu à cet effet.

N'oubliez pas :

- Les seringues et les aiguilles Integra ne sont pas munies d'un raccord Luer standard.
- Après avoir mis la fiole sous pression, évitez de continuer à peser sur la tige du piston pour éviter le point de résistance : ceci pourrait provoquer une activation prématurée.