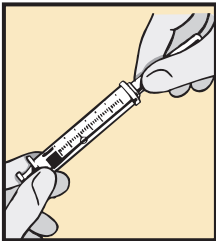
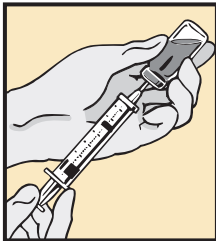


# Seringue Safety-Lok<sup>MC</sup> de BD


## FICHE DE CONSULTATION RAPIDE

**1**


- Pour assembler, tenez l'aiguille et la seringue par la collerette (les ailettes) et faites tourner l'aiguille jusqu'à ce que celle-ci soit fermement en place.

**2**


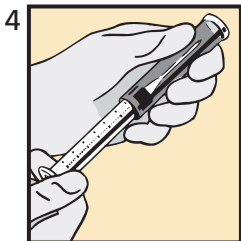
- Pendant l'aspiration, appuyez la collerette contre l'index pour éviter que le manchon ne se dégage.

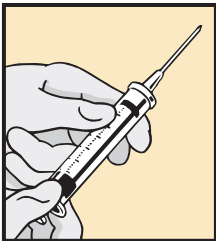**3**


- Après l'injection, tenez fermement le manchon et faites tourner la collerette pour dégager le manchon.

# Seringue Safety-Lok<sup>MC</sup> de BD


## FICHE DE CONSULTATION RAPIDE



- Faites entrer l'aiguille entièrement dans le manchon jusqu'à ce que l'aiguille se verrouille en position de protection.
- Lorsque la bande indicatrice Safe Lock verte recouvre entièrement la bande rouge et qu'un claquement peut être entendu clairement, le manchon est verrouillé.

## N'oubliez pas :

- Il est essentiel d'adopter une bonne technique d'asepsie et de préparer adéquatement la surface de la peau au site d'injection.
- Jetez les seringues Safety-Lok<sup>MC</sup> de BD dans le collecteur à aiguilles le plus proche. Suivez les politiques d'élimination sécuritaire des déchets médicaux en usage à votre établissement.

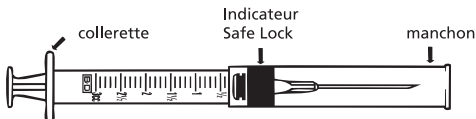

BD, le logotype BD et Safety-Lok sont des marques de commerce déposées de Becton, Dickinson and Company.  
2771 Bristol Circle, Oakville (Ontario) L6H 6R5 1.800.268.5430  
Imprimé au Canada

©2003.

2/01 APT0364F