




VANISHpoint™

Seringue

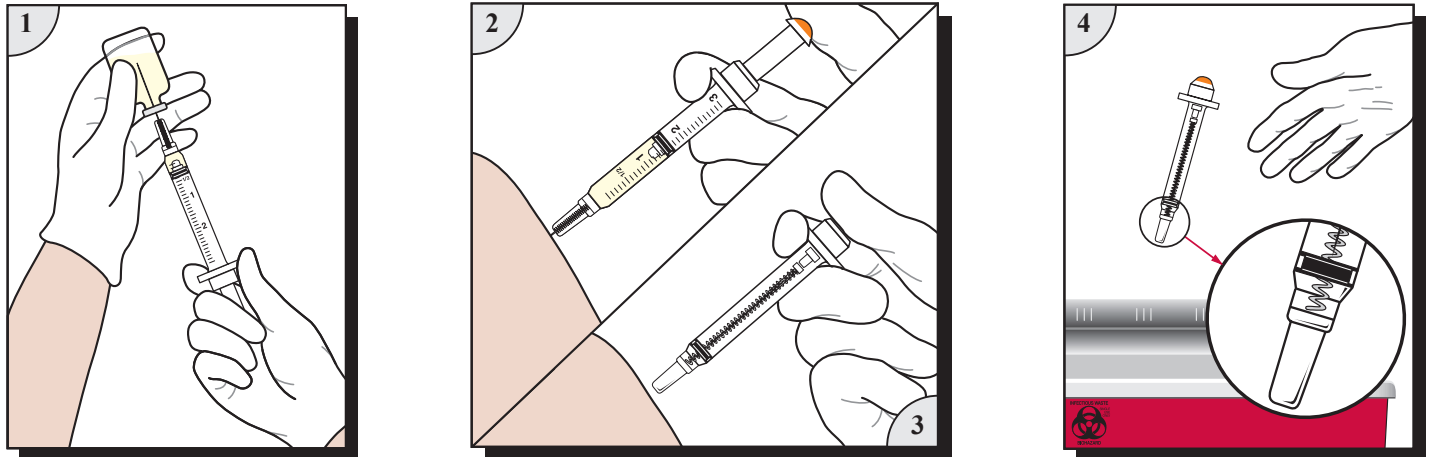

Précautions:

- À usage unique.
- Le contenu est stérile, non toxique et apyrogène. Ne pas utiliser si le produit ou l'emballage est endommagé.
- Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel.
- À utiliser uniquement avec l'aiguille jointe. Ne pas remplacer l'aiguille.
- L'aiguille ne se rétracte automatiquement que lorsque le cylindre de la seringue est vide et que le piston est complètement poussé.

L'information d'utilisation de produit:

1. Préparer et effectuer l'injection en utilisant la technique aseptique conforme au protocole de l'établissement.
2. Pour une injection à un patient, continuer à appuyer sur le piston pour activer la rétraction automatique de l'aiguille **tandis que celle-ci se trouve toujours dans le patient.**
Pour une injection dans un site d'accès intraveineux, continuer à appuyer sur le piston pour activer la rétraction automatique de l'aiguille **et retirer immédiatement l'aiguille du site d'accès. Une dose complète n'est administrée que lorsque le retrait de l'aiguille est activé.**
Pour des applications ne nécessitant pas l'administration de tout le contenu, expulser le reste du contenu et activer le retrait de l'aiguille.
3. L'aiguille se rétracte automatiquement dans la seringue, évitant ainsi une exposition à une aiguille contaminée et rendant la seringue non réutilisable.
4. Mettre au rebut la seringue VanishPoint® dans un récipient approprié aux instruments pointus conformément au protocole de l'établissement.