





VACUETTE® PREMIUM Système d'Aiguille Sécuritaire

greiner bio-one


Instructions d'utilisation

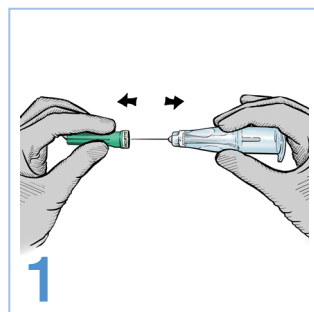


Tenir le VACUETTE® PREMIUM Système d'Aiguille Sécuritaire et retirer avec précaution le capuchon de l'aiguille.

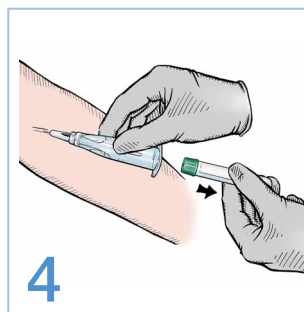


Continuez la collecte des autres tubes et retirez le dernier tube.

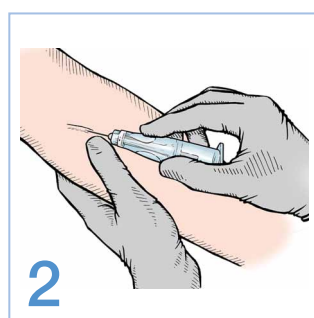


Procédez à la ponction veineuse.

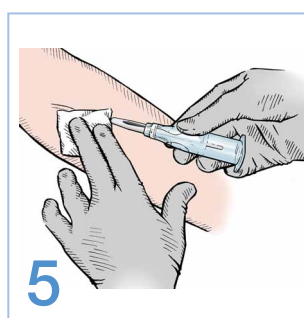

Lorsque le prélèvement est terminé, retirez l'aiguille de la veine du patient.

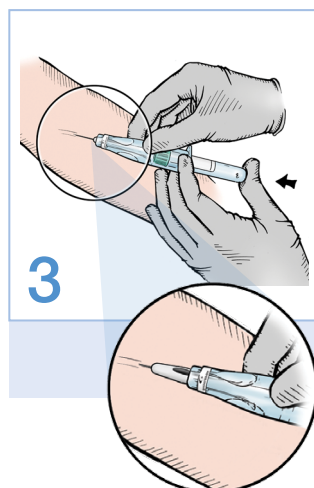

Insérez complètement le premier tube dans le barillet du VACUETTE® PREMIUM Système d'Aiguille Sécuritaire. L'introduction du tube va libérer la gaine de sécurité. La gaine sera appuyé légèrement contre la peau du patient jusqu'à l'achèvement de la ponction veineuse. De plus, la gaine possède une marque visuel (flèche noir) pour assister l'utilisateur et indiquer la profondeur de l'aiguille dans la veine. Sans problème, vous pouvez déplacer l'aiguille dans la veine du patient avec la gaine ajustable.

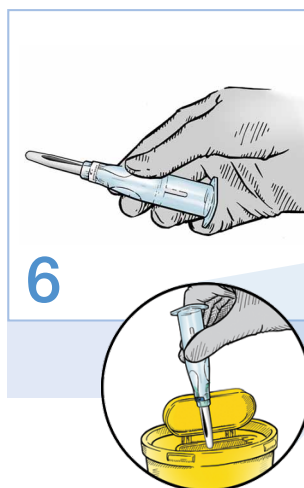

La gaine de sécurité va automatiquement recouvrir l'aiguille. Confirmez visuellement que l'aiguille est bien recouverte avant de jeter dans un contenant approprié.

Information Produit

Numéro de produit	Description	Emballage	
		Boîte	Caisse
450255	VACUETTE® PREMIUM Système d'Aiguille Sécuritaire 20G x 1.25 in	50/boîte	800/caisse
450257	VACUETTE® PREMIUM Système d'Aiguille Sécuritaire 21G x 1.25 in	50/boîte	800/caisse
450256	VACUETTE® PREMIUM Système d'Aiguille Sécuritaire 22G x 1.25 in	50/boîte	800/caisse