




Instructions d'utilisation

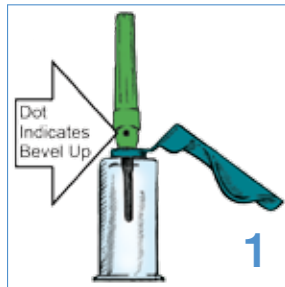


Le point (•) sur le capuchon de l'aiguille indique la position du biseau de l'aiguille

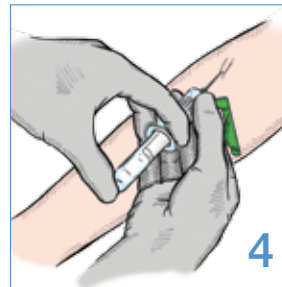

Pousser le tube de prélèvement à l'intérieur du barillet du QUICKSHIELD Complete Plus sur l'aiguille percuse de tube. Celle-ci transpercera sa membrane. S'assurer de bien centrer le tube dans le barillet QUICKSHIELD Complete Plus afin de prévenir une ponction en périphérie de la membrane plutôt qu'au centre et créer ainsi une possible perte de vacuum.

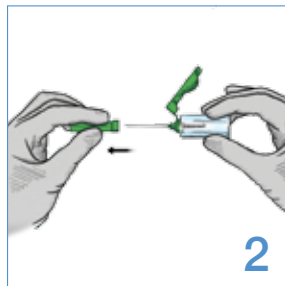


S'assurer que l'aiguille est bien vissée au barillet et ensuite retirer son capuchon. Retirer le en s'éloignant de l'aiguille

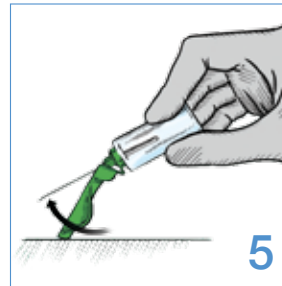


Activer la gaine protectrice en utilisant une surface rigide stable afin de repousser délicatement celle-ci (la gaine) vers l'aiguille.



Vue agrandie du retour sanguin rouge (Flash) à la base de l'aiguille

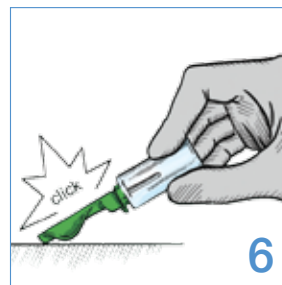

Un son audible et claire (Click) vous assure que le mécanisme de sécurité est belle et bien activé. Le risque de piqûre est ainsi pratiquement éliminé.

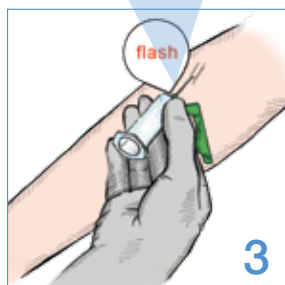

Le début de la ponction veineuse est clairement indiqué car l'aiguille QUICKSHIELD Complete Plus qui possède une base d'aiguille translucide permettant de visualiser le retour sanguin rouge (Flash).



Disposer de l'ensemble aiguille et barillet dans un contenant biorisque.