



Ensemble de Prélèvement Sécurité à Ailette (micro-perfusion)

Instructions d'utilisation


Recommandation: Activer le mécanisme de sécurité lorsque la collecte de sang a été complétée et l'aiguille de la VACUETTE® Safety Blood Collection Set (micro-perfusion) est dans la veine du patient.

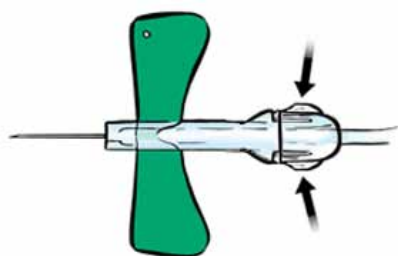

Activez le mécanisme de sécurité en appuyant sur les deux côtés des petites poignées du pivot pour le déverrouiller.

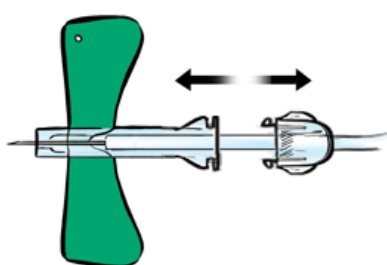

Faites glisser le pivot vers l'arrière.

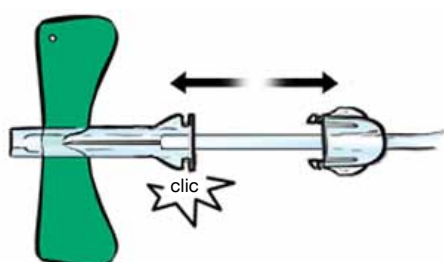

Un «clic» se fait entendre lorsque le mécanisme de sécurité a été correctement activé. Vérifiez que le mécanisme de sécurité est sécurisé contre le protecteur de l'ailette. L'aiguille sera complètement intégrée dans le protecteur de l'ailette.

Retirer le VACUETTE® Safety Blood Collection Set (micro-perfusion) de l'emballage. Assurez-vous que le protecteur d'ailette est bien verrouillé dans son mécanisme de sécurité.

REMARQUE: Si l'emballage individuel a été ouvert ou trafiqué, s'il vous plaît choisir une autre aiguille.


1

Réaliser ponction veineuse avec le bras du patient en position vers le bas.



2

Le retour sanguin (Flashback) confirmera la ponction veineuse avec succès. Immobiliser l'aiguille à ailette avec du ruban adhésif si nécessaire. Remplir les tubes VACUETTE®.

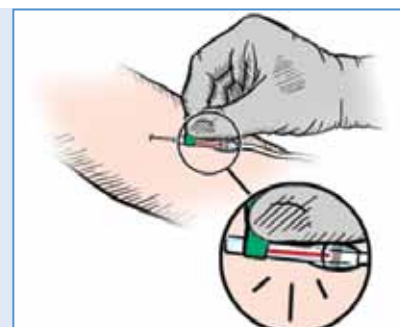

3

Après l'achèvement de la collecte de sang, tenir les ailettes vers le bas avec une seule main. Avec l'autre main, activez le mécanisme de sécurité en appuyant sur les deux côtés du pivot pour le déverrouiller.

REMARQUE: Ne pas appliquer de pression excessive sur le site de ponction.



4

Faites glisser le mécanisme de sécurité vers l'arrière jusqu'à ce qu'un clic sonore soit entendu. Le clic est un signe que le mécanisme de sécurité a été correctement activé. **REMARQUE:** Maintenir la pression sur le site de ponction selon le protocole de l'institution.

