

Smiths, Jelco, Saf-T Wing et Saf-T Holder sont des marques déposées de Smiths Group plc.

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

www.smiths-medical.fr

Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 30

3, rue du Pont des Halles - 94656 RUNGIS Cedex

Smiths Medical France

Désignation	Cdt	Référence
Saf-T Holder® Luer Lock	200	96000
Saf-T Holder® Luer femelle	200	96002
Saf-T Holder® pour hémoculture Luer Lock mâle	50	96004
Saf-T Holder® pour hémoculture Luer femelle	50	96005
Adaptateur pour tube pédiatrique	100	96007

Accessoires pour unité de prélèvement Saf-T Wing®

Version Longue

Version Courte



## Saf-T Holder®

Couleur	Gauge	Aiguille Longueur (mm)	Tubulure Longueur (mm)	Cdt	Référence
●	G25	19	300	200	982512
●	G25	19	150	200	982506
●	G23	19	300	200	982312
●	G23	19	150	200	982306
●	G21	19	300	200	982112
●	G21	19	150	200	982106
Unité de prélèvement Saf-T Wing® avec corps de pompe Saf-T Holder® pré-connecté					
●	G25	19	300	200	972512
●	G25	19	150	200	972506
●	G23	19	300	200	972312
●	G23	19	150	200	972306
●	G21	19	300	200	972112
●	G21	19	150	200	972106

Unité de prélèvement Saf-T Wing®

## Saf-T Wing®


smiths medical  
bringing technology to life

donner vie à la technologie

# Saf-T Wing®

Dispositifs pour prélèvements  
de sang veineux sécurisés



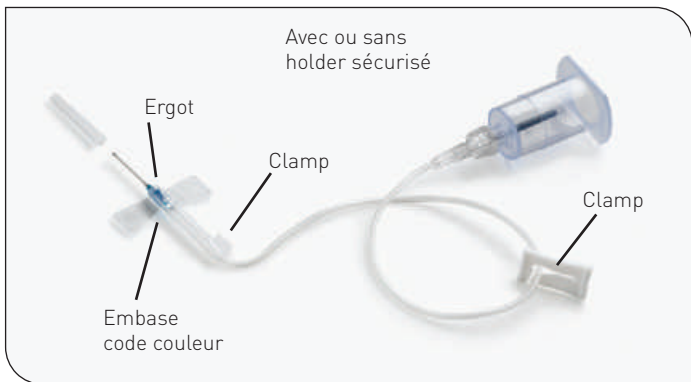

## 1 PRÉPARATION

Sortir le dispositif de son emballage.

Bien vérifier la connexion du corps de pompe avec la tubulure. Revisser si besoin.

## 2 PRÉLÈVEMENT / INJECTION

### Prélèvement

Ponctionner la veine en maintenant les ailettes. Procéder au prélèvement. Pour adapter un corps de pompe spécifique (hémocultures ou pédiatriques), clamper la tubulure, dévisser le corps de pompe présent et connecter le nouveau.

### Injection

Pour adapter une seringue pour une injection : clamper la tubulure, dévisser le corps de pompe présent et connecter la seringue en effectuant un quart de tour.



## 3 ACTIVATION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DANS LA VEINE

### Technique à une main

Clamper le dispositif.

Positionner l'index sur la butée et maintenir la tubulure entre le pouce et le majeur. Tirer sur la tubulure en maintenant la butée jusqu'à rétractation complète et mise en sécurité de l'aiguille indiquée par un clic sonore.

Avec l'autre main, exercer un point de compression sur le site de ponction.



### Technique à deux mains

Clamper le dispositif.

Positionner le pouce et le majeur en arrière des ailettes puis, de l'autre main, tirer sur la tubulure jusqu'à rétractation complète et mise en sécurité de l'aiguille indiquée par un clic sonore.

Exercer un point de compression sur le site de ponction.



## 4 ELIMINATION DU DISPOSITIF

Avant l'élimination du dispositif, la sécurité et l'occlusion de la tubulure peuvent être augmentées en utilisant le clamp situé au niveau du dispositif.

Éliminer le dispositif dans un collecteur adapté.

