


# GRIPPER PLUS®

## Pose en toute confiance, dépose contrôlée et sécurisée

### POSE

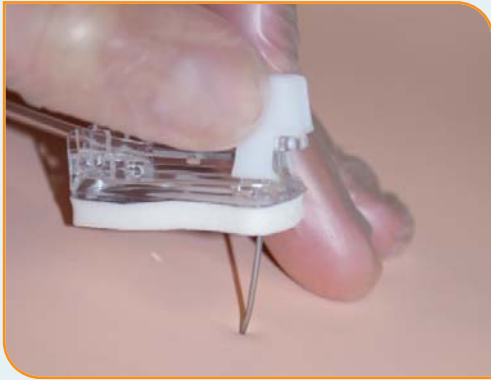


#### Accès à la chambre implantable et retrait de la pince

Préparer le site de ponction selon le protocole hospitalier en vigueur.  
Tenir le GRIPPER PLUS® par la pince blanche entre le pouce et l'index et piquer à 90° dans la chambre.



Tenir les ailettes de la pince et la retirer en la faisant coulisser en arrière. Faire un reflux et procéder au pansement sans rajout de compresse. Mettre en place la perfusion si nécessaire.

### DÉPOSE

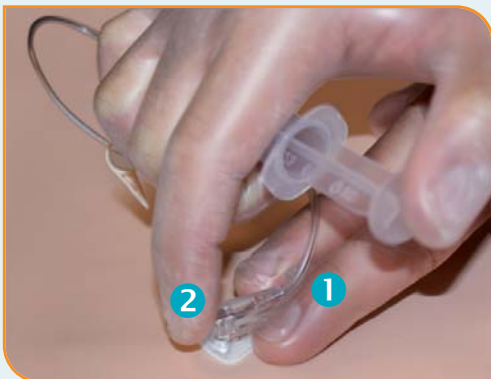

#### Retrait du GRIPPER PLUS® en pression positive

Pour retirer l'aiguille de la chambre implantable, positionner les doigts de la main non dominante sur chaque côté de la base ❶.  
De la main majeure, injecter la solution et placer l'index sur l'extrémité du levier de l'aiguille de sécurité ❷.



#### Mise en sécurité du GRIPPER PLUS®

Relever alors l'aiguille par un mouvement de levier en arrière, souple et continu.  
Noter que le retrait de l'aiguille GRIPPER PLUS® de la chambre implantable est **parfaitement rectiligne**. Continuer de relever l'aiguille jusqu'au **clac sonore** indiquant sa position de verrouillage sécurisé.



#### Élimination du GRIPPER PLUS®

L'aiguille de sécurité GRIPPER PLUS® neutralisée peut alors être éliminée dans un collecteur adapté.

**Rien de plus facile !**

### Egalement disponible pour les injections haute pression

#### GRIPPER PLUS® Power P.A.C.

Aiguille de Huber sécurisée pour injection haute pression



- Tubulure de couleur bleue pour une identification rapide
- Marquage des spécifications sur le clamp



#### GRIPPER PLUS® Power P.A.C.

Gauge	Longueur	Référence Avec site en Y	Référence Sans site en Y
G19	19	21-3468-24	21-3368-24
G19	25	21-3469-24	21-3364-24
G19	32	21-3470-24	21-3365-24
G20	16	21-3464-24	21-3369-24
G20	19	21-3465-24	21-3367-24
G20	25	21-3466-24	21-3362-24
G20	32	21-3467-24	21-3363-24

#### GRIPPER PLUS®

Gauge	Longueur (mm)	Référence Avec site en Y	Référence Sans site en Y
G19	19	21-2968-24	21-2768-24
G19	25	21-2969-24	21-2764-24
G19	32	21-2970-24	21-2765-24
G20	16	21-2964-24	21-2769-24
G20	19	21-2965-24	21-2767-24
G20	25	21-2966-24	21-2762-24
G20	32	21-2967-24	21-2763-24
G22	16	21-2960-24	21-2770-24
G22	19	21-2961-24	21-2766-24
G22	25	21-2962-24	21-2760-24
G22	32	21-2963-24	21-2761-24