

Mode d'emploi

des aiguilles hypodermiques Needle Pro®



Tenir le Needle Pro® par le capuchon.



Connecter-le sur la seringue en effectuant un trois quart de tour pour solidariser le Needle Pro® sur le cône luer.



Retirer le capuchon et procéder à l'utilisation.



Après usage, encliqueter l'aiguille dans le Needle Pro®, en s'appuyant sur une surface plane. Jeter l'ensemble dans un collecteur d'aiguilles.

smiths

Smiths Medical France

3-5, rue du Pont des Halles - 94656 - Rungis Cedex

Tél : 01.58.42.50.00 - Fax : 01.58.42.50.50

morl.info@smiths-medical.com - www.smiths-medical.com

Needle-Pro® est une
marque commerciale de Smiths Group.