



Magellan^{MC}

Dispositif sécuritaire de prélèvement sanguin

Prélèvement sanguin sécuritaire Magellan

- Usage unique
- Sans latex
- Aiguille 1 ¼ po
- Conforme aux normes OSHA

ENSEMBLE SÉCURITAIRE AIGUILLE ET PORTE-TUBE

- Dispositif sécuritaire trois-en-un comprenant un porte tube de prélèvement, une aiguille de prélèvement et un dispositif sécuritaire

ACTIVATION D'UNE SEULE MAIN

- Réduit le temps d'apprentissage et de perfectionnement

GAINE PROTECTRICE INTÉGRÉE

- La gaine protectrice intégrée est impossible à retirer permettant ainsi un respect accru des normes

ORIENTATION BISEAUTÉE

- Minimise les changements de technique

TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ MAGELLAN

- Facilite le respect des critères de sécurité standards

Magellan^{MC}

Dispositif sécuritaire de prélèvement sanguin



1
Retirer la pellicule à l'arrière du porte-tube pour permettre l'insertion du tube.



2
Retirer le capuchon protecteur de l'aiguille en vissant et tirant doucement.



3
Faire le prélèvement selon le protocole de l'établissement.



4
Après le prélèvement et le retrait du tube, verrouiller la gaine protectrice en l'activant à l'aide d'une surface plane



... avec l'index



... avec le pouce. Quand la gaine protectrice est bien verrouillée, on entend un « clic » sonore. En position verrouillée, la pointe de l'aiguille est entièrement recouverte.



5
Quand la gaine protectrice est verrouillée, jeter le produit dans un contenant pour objets tranchants approuvé.

Pour commander

Code d'article	Description	Quantité par caisse
8881226121	Dispositif sécuritaire de prélèvement sanguin 21 x 1¼ po	300
8881226122	Dispositif sécuritaire de prélèvement sanguin 22 x 1¼ po	300

COVIDIEN, COVIDIEN et le logo, ainsi que les marques de commerce *MC* sont des marques de commerce de Covidien AG ou ses sociétés affiliées. © 2008 Covidien AG ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Licence de Santé Canada détenue par Tyco Healthcare.

CDN-P00012-F (H-6214) Rev. 2008/04

